


# Medizid<sup>®</sup> Rapid Optima

Sprühwischdesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten

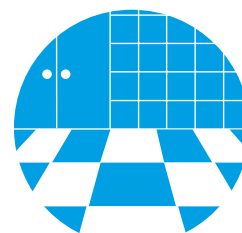

## Präparatetyp

Medizid<sup>®</sup> Rapid Optima ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen.

## Anwendungsbereich

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Pflegeheimen, Ambulanzen und Pflegebereichen durch Fachpersonal. Nicht verwenden für die Desinfektion von Instrumenten oder invasiven Geräten. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie Acrylglas und Reflektoren von Dental- und Medicalleuchten aus Polycarbonatglas. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

## Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Mittel bei Raumtemperatur (20 - 25 °C) und nur unverdünnt anwenden. Oberflächen vollständig benetzen, antrocknen lassen und ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeit beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Haltbarkeit

Medizid<sup>®</sup> Rapid Optima kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

## Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 43,0 g Ethanol.

## Einwirkzeit:

Wirksamkeiten	vollständig benetzt
<b>Nach VAH / DGHM:</b>	
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)	1 min.



## Präparateeigenschaften

- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- schnell und umfassend wirksam, in bereits 60 sek.
- vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas!
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH-gelistet

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00949	500 ml	18 Flaschen	11169771
00950	5 L	2 Kanister	-